

GRATULACJE

Dziękujemy za zakup jednego z najnowszych urządzeń do wybielania zębów dostępnego na rynku. Dzięki temu produktowi w łatwy i szybki sposób wybielisz Swoje zęby nie wychodząc z domu, nie odwiedzając dentysty. Proszę zapoznać się z tą instrukcją przed użyciem.

UWAGA!

- Niektórzy mogą odczuwać tymczasowe podrażnienie dziąseł, wybielenie dziąseł lub wrażliwość zębów. Jest to tymczasowe i nieszkodliwe.
- Ten system został zaprojektowany by wybielać naturalne zęby. NIE wybieli on nakładek, koron, mostków, plomb, wypełnień i innych sztucznych (nie zbudowanych z żywej tkanki zębowej)
- Wybielacz ten nie usunie plam spowodowanych przez tetracycline
- Jeżeli masz choroby dziąseł lub cofające się dziąsła – przed użyciem skonsultuj się z dentystą.

ZASTRZEŻENIA!

- Trzymać z dala od dzieci
- Dzieci poniżej 16 życia powinny skonsultować się z dentystą przed zastosowaniem preparatu
- Kobiety w ciąży i karmiące nie mogą używać preparatu
- Nie używać, jeżeli posiada się aparat ortodontyczny
- Nie używać na noc, nie zasypiać podczas sesji wybielania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Unikać kontaktu z oczami. Przepłukać oczy dużą ilością wody, jeżeli dojdzie do kontaktu.
- Unikać kontaktu ze skórą. Kontakt może spowodować tymczasowe wybielenie lub podrażnienie skóry. Umyć skórę wodą z mydłem.
- Unikać kontaktu z ubraniami i materiałem.
- Przechowywać żel w chłodnym i suchym miejscu z dala od promieni słonecznych.

PRZEDSTAWIENIE PRODUKTU

Nauka dentystyczna przeszła długą drogę by dostarczyć narzędzia, które pomogą Nam w tym by nasze usta i uśmiechy cieszyły się dobrą kondycją. Najnowszym osiągnięciem tej techniki jest technologia światła. Polega ona na użyciu bezpiecznego, prostego światła z diody LED w połączeniu z wybielającym żelem. Dzięki takiemu zestawieniu, wybielanie zębów jest szybki, bezpieczne i może być bez obaw przeprowadzane w domu.

Wybielacz do nabycia:
WWW.MARQS.COM.PL

Zestaw zawiera:



1. Transmitter niebieskiego wybielającego światła
2. Dwie litowe baterie do źródła światła CR2025, już zainstalowane.
3. Dwie tubki żelu, mocna i łagodniejsza mięta.
4. Silikonowa wkładka na zęby
5. Instrukcja

Obsługa transmitter światła


- Oczyszczy transmitter delikatnie myjąc go mydłem i spłucz pod bieżącą wodą.
- Nie zamaczaj go całkowicie!
- Nie wkładaj transmittera do zmywarki

Przed użyciem

Dwie litowe baterie CR2025 są już zainstalowane w urządzeniu dla twojej wygody.

WYBIELANIE ZĘBÓW

1. Umyj zęby – tak jak robisz to normalnie.
2. Odkręć tubę z żelem
3. Wyciśnij pasek żelu (o szerokości ok. 0,5cm) na górną i dolną część nakładki (patrz obrazek nr 1)
4. Umieść nakładkę na zębach (obrazek nr 2)
5. Umieść transmiter światła w ustach przykładając go do nakładki (obrazek nr 3)
6. Zaciśnij wargi wokół brzegu transmittera by się nie przesunął podczas zabiegu (obrazek nr 4)
7. Włącz transmiter przyciskiem (obrazek nr 5)
8. Transmitter światła wyłączy się automatycznie po 10 minutach, oznacza to koniec cyklu.

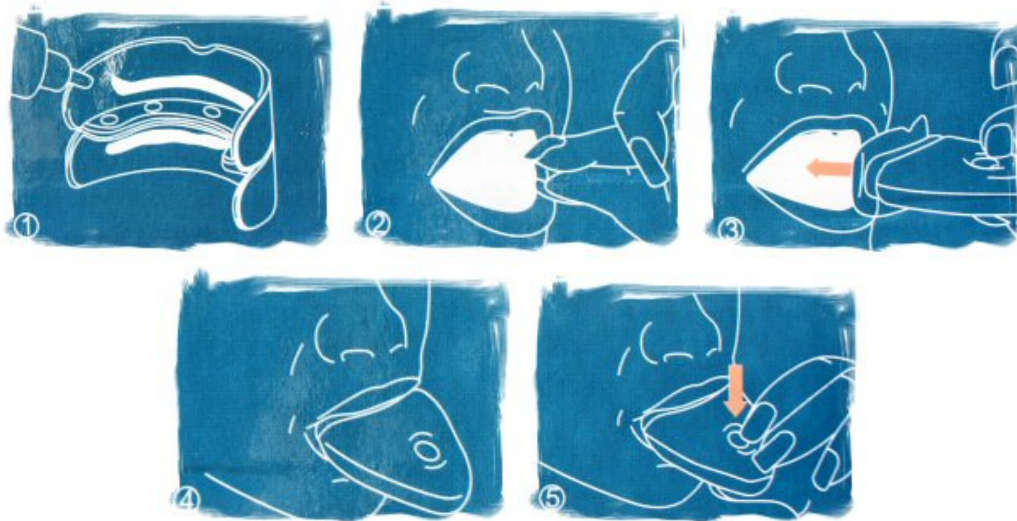

DODATKOWE WYBIELANIE

Dla dodatkowego wybielania (nie wolno przesadzać), po prostu włącz transmiter światła ponownie na 10 minut. Dla maksymalizacji rezultatów możesz zastosować 3 cykle, czyli łącznie 30 minut naświetlania.

INTENSYWNE WYBIELANIE

Dla intensywnego wybielania stosuj 3 cykle (w sumie 30 minut naświetlania) raz dziennie przez 5 kolejnych dni. Umyj nakładkę i transmiter po każdym użyciu.

ROZDZIELANIE I ZŁĄCZANIE NAKŁADKI

1. Jeżeli chcesz wybielić tylko dolne lub górne zęby, po prostu delikatnie rozłącz nakładkę z silikonowych zaczepów na dwie części (obrazek nr 6)
2. Rozdzielaj nakładkę przed jej umyciem – dzięki temu zachowasz lepszą higienę.
3. By złożyć nakładkę po prostu przyciśnij obie części do siebie aż silikonowe wypustki dopasują się do siebie (obrazek nr 7)

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Jeżeli działa to tak szybko, czy nie jest szkodliwe dla zębów?

Ten produkt zawiera ten sam utleniacz, co stosowany przez dentystów podczas zabiegu wybielania w gabinecie. Nie ma się więc czym martwić.

2. Co jeżeli odczuję podrażnienie dziąseł, dziąsła staną się białe albo zęby będą wrażliwe?

Niektórzy mogą odczuwać wymienione przypadłości po zastosowaniu produktu, jednak są one tymczasowe i całkowicie NIE SZKODLIWE. Jeżeli przypadłości te się powtarzają spróbuj użyć mniej żelu, skróć czas naświetlania, albo wydłuż czas pomiędzy kolejnymi sesjami.

3. Co jeżeli będę miała białe plamy na zębach po zastosowaniu wybielacza?

Niektóre zęby mogą mieć białe plamki, jest to zjawisko tymczasowe i znikną one po paru godzinach – jest to NIE SZKODLIWE.

4. Jak bardzo wybielą się moje zęby?

To zależy od tego jak bardzo są zanieczyszczone oraz od tego, jaki jest NATURALNY kolor zębów. Jeżeli kolor ten jest lekko żółtawy (nie wszystkie zęby z natury są krystalicznie czystko białe) wybielacz nie wybieli ich bardziej, nie będzie on odpowiedzialny za brak skuteczności. Nie da się zmienić natury tak prostymi metodami. W takich przypadkach polecam nakładki porcelanowe – znane z serii „Ekstremalne metamorfozy” za cenę z 3 zerami PLN

5. Moje zęby nie wybielają się tak szybko jak bym tego chciał. Co mam zrobić?

Niektóre zęby wymagają dłuższego wybielania. Możesz stosować preparat przez dłuższy czas lub taki masz naturalny kolor zębów, patrz oferta dentystów na porcelanowe nakładki za xxxzł

6. Używam innych produktów wybielających zęby. Czy nadal mogę używać tego urządzenia?

Tak, można używać innych produktów wybielających dla lepszego efektu.

7. Jaki jest skład żelu?

Gliceryna, woda, winylowy zagęszczacz wypełniający, dwutlenek krzemu, wodorotlenek sodu, substancje smakowe, sacharyna, konserwant K12, sorbitol, stabilizator EDTA